



11

Ролики со стопорами необходимо разместить с лицевой стороны тумбы. С колесами использовать шайбы диаметром 30 мм.

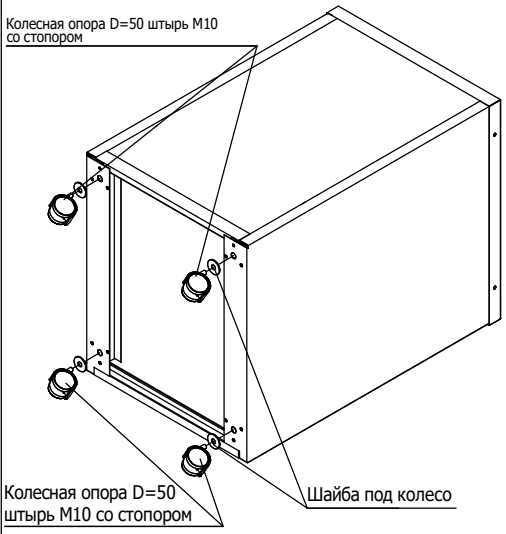


12

Выдвинуть несущую часть направляющих, совместить и завести соответствующие крепежные элементы в пазы ящика.

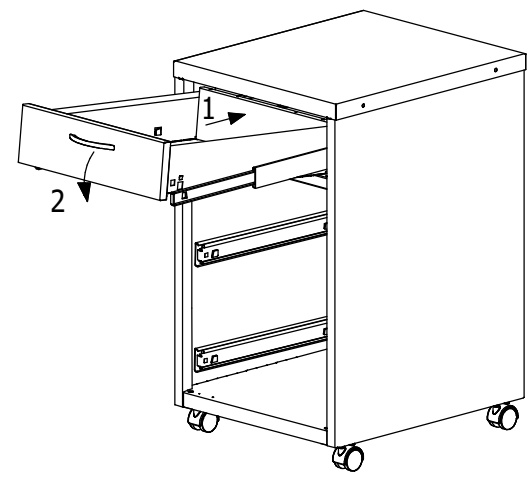

13

Установите шильдик в пазы на крыше.

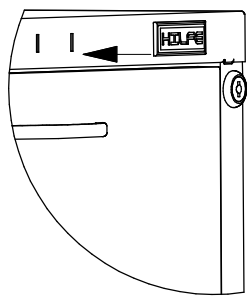

Тумба медицинская МД ТПЛ-4



Пояснения к инструкции

- Последовательность сборки указана порядковым номером в верхнем левом углу каждого изображения сборочной операции
- Тип и количество крепежных изделий (если они требуются) для сборочной операции указано рядом с порядковым номером сборочной операции.

Инструкция по сборке

